

clearblue

DIGITAL TEST DE GROSSESSE

Avec estimation de l'âge de la grossesse
ostic

ETAPE 1 Faire le test

SOIT

Tester votre flux d'urine

- Maintenez la tige absorbante orientée vers le bas sous le flux d'urine **pendant 5 secondes seulement.**
- Prenez soin de ne pas mouiller le reste du Bâtonnet-Test.
- Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez et poser le Bâtonnet-Test à plat.

5 SECONDES



SOIT

Recueillir un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec

- Maintenez la Tige Absorbante orientée vers le bas dans l'urine comme indiqué ci-dessous **pendant 20 secondes seulement.**
- Vous pouvez replacer le capuchon si vous le souhaitez et poser le Bâtonnet-Test à plat

20 SECONDES



Durant le test, ne maintenez **jamais** le Bâtonnet-Test orienté vers le haut.



ETAPE 2 Attendre...

- Le « sablier » clignote pour vous indiquer que le test est en cours.
- Votre résultat apparaît lorsque le sablier cesse de clignoter. Si le sablier n'apparaît pas après avoir fait le test, reportez vous à la question 6.



ETAPE 3 Lire votre résultat

Le test de grossesse Digital **Clearblue** fournit une estimation de l'âge de la grossesse. Ces informations s'affichent sur l'écran avec un résultat "Enceinte".

- L'écran affiche votre résultat dans les **3 minutes.**
- Un résultat "Enceinte" peut s'afficher sur l'écran **avant** le résultat de l'estimation de l'âge de la grossesse. **Attendez** jusqu'à ce que le sablier cesse de clignoter pour visualiser le résultat de l'estimation de l'âge de la grossesse. Cette procédure peut prendre jusqu'à 3 minutes.
- Certains résultats peuvent apparaître en moins d'1 minute.
- Votre résultat reste affiché à l'écran pendant 24 heures environ.
- Si votre résultat est "Enceinte", consultez votre médecin qui vous indiquera les étapes et les démarches à suivre et datera votre grossesse.
- La fiabilité du résultat « enceinte/pas enceinte » est de plus de 99% lorsque le test est réalisé à compter de la date présumée des règles. Si vous faites le test plus tôt, cette fiabilité est réduite (voir question 4 au verso). L'estimation de l'âge de la grossesse est fiable à 92% en moyenne. Cette estimation repose sur la quantité d'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) présente dans vos urines. La quantité de hCG varie d'une femme à l'autre, c'est pourquoi cette estimation peut être erronée (voir question 3 au verso).

Interprétation des résultats

Résultats	Semaines à partir de la conception
	Votre résultat est "Pas Enceinte" Consultez la question 12 des Questions et Réponses.
	Votre résultat est "Enceinte" et la conception remonte à environ 1 à 2 semaines.
	Votre résultat est "Enceinte" et la conception remonte à environ 2 à 3 semaines.
	Votre résultat est "Enceinte" et la conception remonte à plus de trois semaines.

Si vous êtes enceinte, consultez votre médecin qui datera votre grossesse

Questions et Réponses

Veillez lire la section qui répond aux questions les plus fréquemment posées.

Erreurs de test

Veillez lire la section "Erreurs de test" si vous avez utilisé le Bâtonnet-Test et que l'écran n'indique aucun des résultats figurant sur cette page.

1. Comment fonctionne le test de grossesse Digital Clearblue avec estimation de l'âge de la grossesse?

Quand vous êtes enceinte, votre corps sécrète l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine). La quantité de hCG présente dans votre organisme augmente dès les premiers stades de la grossesse. **Clearblue** peut détecter cette quantité d'hormone dans vos urines. **Clearblue** propose une estimation de l'âge de grossesse en semaines, qui est fonction de la quantité de hCG présente dans vos urines.

2. Quelle est la précision de détection d'une grossesse du test de grossesse Clearblue Digital?

Dans les tests en laboratoire, le test de grossesse digital **Clearblue** offre une fiabilité de plus de 99 % (à partir de 25 mUI/ml d'hCG) pour détecter si vous êtes ou non enceinte lorsqu'il est utilisé à compter de la date présumée de vos règles. Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat "Pas enceinte", vous pouvez tout de même être enceinte. *Consultez la question 4.*

3. Quelle est la précision de l'estimation de l'âge de la grossesse Clearblue ?

L'estimation de l'âge de la grossesse est fiable à 92% en moyenne. Cette estimation repose sur la quantité d'hCG (gonadotrophine chorionique humaine) présente dans vos urines. La quantité de hCG varie d'une femme à l'autre et en cas de grossesse multiple (jumeaux). C'est pourquoi, l'estimation de l'âge de la grossesse peut donner des résultats erronés dans 8% des cas.

Si vous effectuez le test plus de 6 semaines après la conception, le test peut fournir des résultats inattendus. Cela est dû au fait que la quantité de hCG dans les urines est alors trop élevée pour que le test fournisse une estimation précise de la durée écoulée depuis la conception.

4. Quand puis-je effectuer un test avec le test de grossesse Digital Clearblue?

Le test de grossesse digital **Clearblue** peut être utilisé jusqu'à 4 jours avant la date présumée des règles. Si vous effectuez le test avant la date présumée de vos règles et que vous obtenez un résultat "Pas enceinte", vous pouvez tout de même être enceinte. Consultez le tableau ci-après, qui indique les résultats d'essais cliniques réalisés avec le test de grossesse digital **Clearblue** sur des échantillons de grossesse jeune.

Tester plus tôt

Clearblue vous recommande d'effectuer le test à partir de la date présumée de vos règles. Cependant, la concentration d'hormone de grossesse augmente rapidement au début de la grossesse et le test de grossesse **Clearblue Digital** peut être utilisé jusqu'à 4 jours avant la date présumée des règles avec un résultat positif pour 55 % des femmes enceintes.

Si vous effectuez le test avant la date présumée des règles et que votre résultat est « pas enceinte », il est cependant possible que vous soyez enceinte.

Lors des essais réalisés en laboratoire le test de grossesse **Clearblue Digital** a donné les résultats suivants :

Nombre de jours avant la date présumée des règles	% d'échantillons de femmes enceintes donnant un résultat "Enceinte"
-1	98%
-2	97%
-3	86%
-4	55%

Si le résultat est "Pas enceinte" mais que vous suspectez cependant une grossesse, *consultez la question 10.*

Pour calculer la date présumée de vos règles, calculez la durée habituelle de votre cycle en comptant le nombre de jours entre le premier jour des règles et la veille du jour où débute votre cycle suivant.

- Si vos cycles sont irréguliers, considérez votre plus long cycle des derniers mois précédant le test.
- Si vous ne connaissez pas du tout la date présumée de vos règles, nous vous recommandons de considérer au moins 19 jours depuis votre dernier rapport non protégé.

5. Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent-ils affecter le résultat?

- Lisez systématiquement les instructions du médicament que vous prenez actuellement avant d'effectuer un test.
- Les médicaments contre la stérilité contenant des hCG peuvent entraîner des résultats erronés (ces médicaments contre la stérilité sont habituellement administrés par injection, et un test trop rapproché par rapport à la dernière injection peut entraîner un résultat "Enceinte" faux).

- Les autres traitements contre la stérilité (telles que le citrate de clomiphène), les analgésiques et les contraceptifs hormonaux (pilule contraceptive par exemple) ne devraient pas affecter le résultat.

- Si vous avez récemment arrêté votre contraception hormonale ou si vous utilisez des traitements contre la stérilité comme le citrate de clomiphène, vos cycles peuvent être irréguliers et vous pouvez réaliser le test trop précocement.

- Si vous avez été enceinte il y a peu (même sans avoir été à terme), il se peut que vous obteniez un faux résultat "Enceinte".

- Si vous êtes en période de ménopause ou que vous vous en approchez, vous pouvez obtenir un résultat positif faux, même si vous n'êtes pas enceinte.

- Une grossesse extra-utérine et des kystes ovariens peuvent entraîner des résultats erronés.

- Des grossesses multiples ou extra-utérines peuvent entraîner des résultats erronés de l'estimation de l'âge de la grossesse.

- Une fausse couche peut survenir lorsque votre grossesse est à un stade précoce. Si vous obtenez un résultat "Enceinte", vous pouvez ensuite découvrir que vous n'êtes pas enceinte du fait d'une fausse couche. Dans ces circonstances, l'estimation de l'âge de la grossesse peut afficher des résultats inattendus.

Si vous obtenez des résultats inattendus, parlez-en à votre médecin.

6. J'ai utilisé le test, mais le symbole d'attente ne s'est pas affiché. Qu'est-ce que cela signifie?

Le test n'a pas fonctionné correctement. Veuillez contacter le service consommateurs **Clearblue**.

7. J'ai utilisé le test mais aucun résultat ne s'est affiché à l'écran. Qu'est-ce que cela signifie?

Votre résultat doit s'afficher à l'écran dans les 3 minutes. Dans le cas contraire, *consultez la section Erreurs de test.*

8. Mon test indique que je suis enceinte. Que dois-je faire?

Si votre résultat est « enceinte », consultez votre médecin qui vous indiquera la marche à suivre et datera votre grossesse. **Clearblue** vous donne uniquement une estimation de la date de conception.

9. Mon test indique que je suis enceinte, mais je ne pense pas que la date de conception affichée soit correcte. Est-ce possible?

La précision de l'estimation de l'âge de la grossesse est de 92 % lorsque le test est réalisé en utilisant les premières urines du jour. Certains médicaments ou certains états médicaux peuvent affecter le résultat. *Consultez la question 5.*

10. Mon test indique que je ne suis pas enceinte. Que dois-je faire ?

Il se peut que vous ne soyez effectivement pas enceinte, ou que la quantité d'hormone de grossesse ne soit pas suffisamment élevée pour être détectée, ou encore que vous soyez trompée dans le calcul de la date présumée de vos règles

- Si vous avez réalisé le test trop tôt, effectuez un nouveau test à la date présumée de vos règles.

- Si vous avez atteint la date présumée de vos règles, effectuez un nouveau test dans 3 jours. Si ce test vous donne un résultat "Pas Enceinte" mais que vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

ERREURS DE TEST

Erreur d'utilisation - une erreur s'est produite lors du test.

- La raison peut être la suivante :
 • Vous n'avez pas orienté la tige absorbante vers le bas, ou le test n'a pas été mis à plat après application de l'urine.
 • Vous avez appliqué trop ou trop peu d'urine.



Effectuez un nouveau test en utilisant un nouveau Bâtonnet-Test et en veillant à bien respecter les instructions.

Erreur due au test - Si l'écran reste vide après utilisation du test, contactez le service consommateurs **Clearblue** pour de plus amples informations.



ELIMINATION DE VOTRE TEST

- Avant de jeter votre test, retirez la pile du Bâtonnet-Test. Pour ce faire, insérez une pièce dans la fente, au niveau de l'extrémité, et tournez pour ouvrir l'arrière du Bâtonnet-Test en le cassant.
- Retirez la pile et jetez-la en respectant le programme de recyclage approprié. Attention: ne démontez pas la pile, ne la rechargez pas et ne la jetez pas au feu. Ne l'avez pas. Conservez-la hors de portée des enfants.
- Éliminez le reste du Bâtonnet-Test conformément au programme de recyclage approprié pour l'équipement électrique.
- Ne jetez pas un équipement électrique au feu.



Le présent dispositif répond aux exigences de la norme EN61326 en matière d'émissions électromagnétiques. Il présente par conséquent un faible niveau d'émissions électromagnétiques. Il ne doit pas y avoir d'interférence avec d'autres équipements électriques. Le présent test ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de sources de rayonnement électromagnétique intense, par exemple de téléphones mobiles, car ceux-ci peuvent entraver le bon fonctionnement du test. Pour éviter toute décharge électrostatique, n'utilisez pas le test dans un environnement très sec, en particulier un environnement où se trouvent des matières synthétiques.

Autodiagnostic: Test de grossesse usage domestique uniquement. A usage unique. Pour un diagnostic in vitro uniquement. **!TUD!** Ne convient pas à une utilisation interne. Conservez hors de portée des enfants. Conservez à une température de 2 °C à 30 °C (36 °F - 86 °F). En cas de stockage au réfrigérateur, sortez le dispositif et maintenez-le à température ambiante pendant 30 minutes avant de réaliser le test. N'utilisez pas le test si la pochette protectrice du bâtonnet-test est endommagée. N'utilisez pas le bâtonnet-test après la date d'expiration. Ce produit contient une pile. Jetez-la conformément à la réglementation locale. Les présentes instructions s'appliquent au modèle numéro 507005

Service Consommateurs Clearblue conseillères disponibles du lundi Vendredi, de 8h à 16h, sauf jours fériés.

0805 540 267

Appels gratuits depuis un poste fixe.
 Veuillez nous indiquer le numéro de **100** qui figure sur votre boîte.
 Les appels sont enregistrés pour des raisons de formation et de contrôle qualité.
 Consultez notre site à l'adresse

www.clearblue.com

© 2008 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Fabriqués par : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.
Clearblue est une marque déposée.